



طريقة الإستعمال


SMT baby[®]

SMT môm[®]

ضع كل أنف من الأنوف الستة على المسطرة على أنف الطفل
إختر الأنف الأكثر تناسبا مع تقاسيم وجه الطفل.
كل أنف مشدود إلى المسطرة من طرفين.
إنزع الأنف الذي إخترته من على المسطرة.



بل استخدام اليد أو بالإستعانة بكلابية "أنخل بر فق الأنف في الحامل.

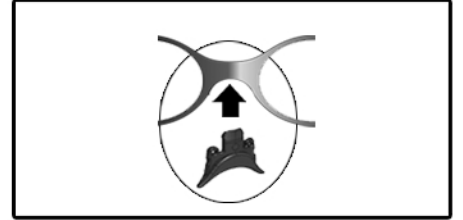


ممكن أن تضع نقطة مادة لاصقة تحت الأنف بعد وضعه في مكانه.



لنزع الأنف، إستخدم الكلابية الموجودة في وسط المسطرة.
إذا إستخدمت مادة لاصقة، سخن الحامل قبل إستخدام الكلابية لنزع الأنف.



لتقليص طول الذراعين: إجنب الغلاف الخارجي ثم إقطعه و الجزء المعدني حسب الطول المراد.
يجب وضع بعض الماصق بين الغلاف الخارجي و الجزء البلاستيكي للذراع.
يمكنك كذلك تسخين الذراع حتى يلتصق الغلاف تماما بالجزء المعدني.

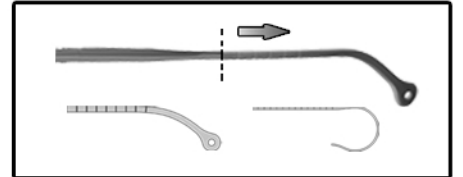

بالنسبة للحمل SMT MÔM :

عند الحاجة، فك الغطاء باستخدام مفك مفلطح يدخل بين الغطاء و الحامل ثم يُدار باليد.
لتركيب الغطاء، إستخدم كلابية مفلطحة بجرص.

